



GUINOT
INSTITUT • PARIS

HYDRADERM
cellular  energy

ANTI-AGEING
INNOVATION



FEMEILE și FRUMUȘETEĂ LOR

FEMEILE si FRMUSETEA LOR

Femeile de toate varstele sunt ingrijorate cand vine vorba de frumusetea si tinereta tenului lor.

"Nu putem lupta impotriva trecerii timpului..."



Imbatranirea pielii este guvernata de ceasul biologic si accelerata de factorii externi....

... Nu putem indepartaefectele trecerii timpului asupra tenului "

la 20, pregatim pielea pentru varsta de 30
la 30, pregatim pielea pentru varsta de 40
la 50, pregatim pielea pentru varsta de 50 etc.



Nicodata nu este prea devreme sau prea tarziu sa lupti impotriva semnelor de imbatranire .

FEMEILE si FRMUSETEA LOR

AZI, clientii care folosesc tratamente regenerante sunt tot mai incurajati sa foloseasca proceduri medicale si sa aleaga produse de ingrijire pentru acasa de la branduri medicale, in detrimentul Saloanelor de Frumuseti.

Medicina estetica Anti-ageing



Botox si acid hialuronic
Peelinguri chimice /medicale



**DUREROASE SI COSTISITOARE
EFFECT PE TERMEN SCURT**

Produse Anti-ageing



Ingredineti consacratii cu efecte
promitatoare



**SCUMPE SI CONFORTABILE
REZULTATE DUPA CATEVA
SAPTAMANI**

Aceste 2 solutii sunt in competitie directa cu saloanele de imfrumusetare. Acest lucru inseamna ca Esteticienele trebuie sa castige clientele cu puterea mare de cumparare.

**Anti-Ageing Facial = cresterea incasarilor provenind din ambele servicii
profesionale si revazare.**

ALTERNATIVA la Medicina Estetica

ALTERNATIVA la Medicina Estetica

GUINOT a creat un **aparat revolucionar** care ofera metode de tratament cu rezultate spectaculoase pentru regenerarea tenului.

HYDRADERM
cellular  energy



Rezultate imediate

Fara durere

Accesibil pentru orice buget

ALTERNATIVA la Medicina Estetica



Patentarea include:

- Energia Termica
- Ionizare Dinamica
- Energia termica asociata cu Energia Dinamica
- Design-ul aparatului (forma, ecran, electrozi, etc.)

ALTERNATIVA la Medicina Estetica

2 metode complementare de tratament de regenerare

HYDRADERMIE Jeunesse Treatment

Regenerare vizibila atenuului
prin stimularea activitatii
celulare

*Personalizat in functie de
obiectivele de frumusețe
ale clientilor.*


HYDRADERMIE**LIFT**

Regenerarea vizibila a
trasaturilor faciale
prin cresterea
tonusului muscular.

Tratamentul Hydradermie Jeunesse regenereaza vizibil tenul.

Tratamentul Hydradermie Jeunesse regenereaza vizibil tenul.

De cand ne nastem, activitatea celulara se diminueaza odata cu trecerea timpului. Celulele noastre pierd energie si implicit diviziunea celulara este redusa. Sinteza de fibre de elastina este redusa iar semnele de imbatranire se instaleaza vizibil..

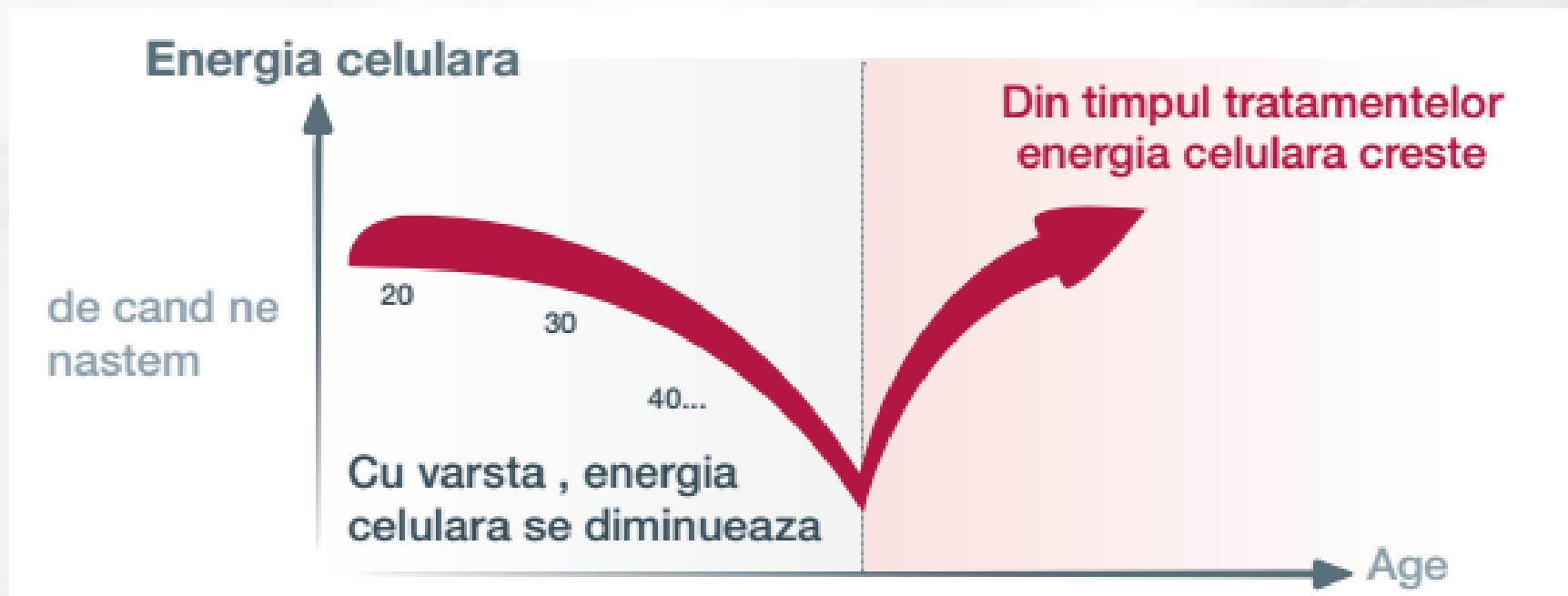

Tratamentul Hydradermie Jeunesse regenereaza vizibil tenul.

Cum putem creste energia celulara ?

Energia Moleculara



+ -
Curent
Galvanic cu
polaritate
alternativa : 2
sec.



Energia Termica

Ionizarea Dinamica care creste
activitatea biologica

Temperatura ridicata creste
activitatea celulara.



RECAPATAREA ACTIVITATII CELULARE CARACTERISTICA TENULUI TANAR.

Tratamentul Hydradermie Jeunesse regenereaza vizibil tenul.

Tratamentul Hydradermie Jeunesse se realizeaza cu ajutorul a 8 serum geluri care se adapteaza in functie de obiectivele de frumuseti ale clientelor.



Serum geluri:

- Age logic
- Anti-wrinkle
- Longue Vie Soleil
- Moisturizing
- Nourishing
- Soothing
- Purifying
- Lightening

Tratamentul Hydradermie Jeunesse regenereaza vizibil tenul.

Rezultate exptionale vizibile la finalul tratamentului

**Metoda de Tratament patentata cu
efect spectaculos de infrumusetare
si reintinerire.**



Tratamentul Hydradermie Jeunesse regenereaza vizibil tenul.

Eficienta dovedita stiintific

Evaluation of the Treatment's anti-ageing activity and action on cellular energy using human skin explants

Testele sunt realizate de BIO-EC Laboratory (Biological Research Centre specializat in testarea produselor cosmetice)

Protocolul testului:

- Protocolul utilizeaza piele recoltata prin abdominoplastie de la o femeie caucaziana in varsta de 54 ani .
- Aplicati Exfoliating Cleanser. Clatiti si aplicati Lotiune tonica.
- Aplicati Age Logic Serum Gel si apoi miscati usor electrozii timp de 10 min. in modul **Dynamic Ionisation**, setat la o intensitate de nivel 5.
- Aplicati Oxygenating Emulsion OZ2 si miscati usor electrozii timp de 5 min. in mod **Thermal**, setat la o intensitate de nivel 5.


Tratamentul Hydradermie Jeunesse regenereaza vizibil tenul.

Eficienta dovedita stiintific.

Creste energia celulara.

INAINTE


Mostra netratata D1

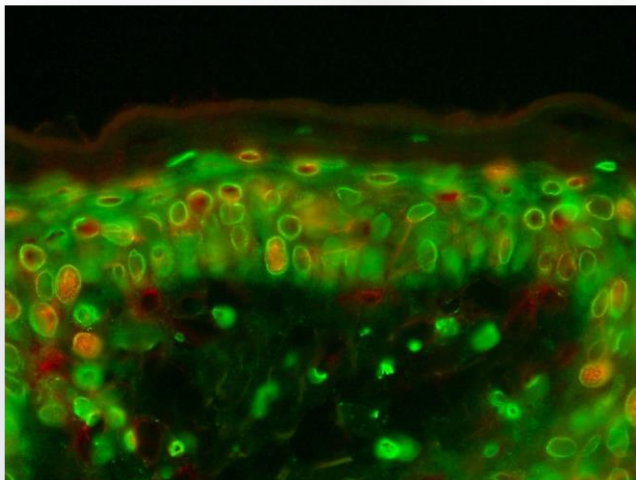

Energia celulara

**DUPA Hydradermie
Jeunesse Treatment**

Tratata D1

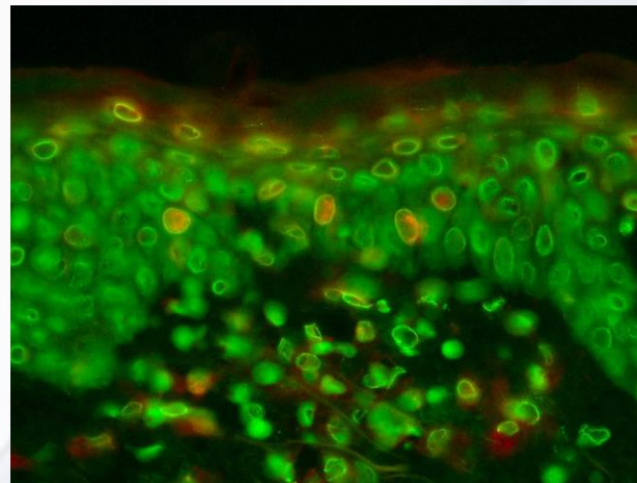

Cresterea
energiei celulare

Evidentierea (imunomarcarea) aconidazei (este o enzima care lucreaza in ciclul Krebs) mitocondriale in ziua 1: crestera activitatii aconidazei la nivel mitocondrial din epiderma si derma. Test efectuat pe tesut uman


Tratamentul Hydradermie Jeunesse regenereaza vizibil tenul.

Eficienta dovedita stiintific.

Creste regenerarea celulara

INAINTE

Mostra netratata D5

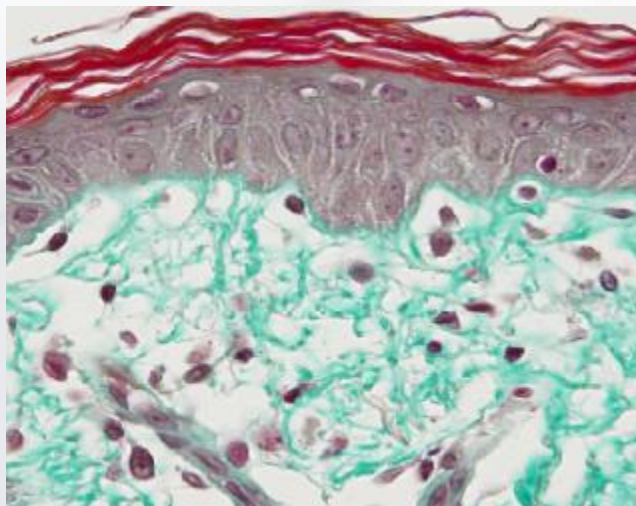


Grosimea
epidermei

Densitatea
colagenului

**DUPA Hydradermie Youth
Treatment**

Tratata cu D5

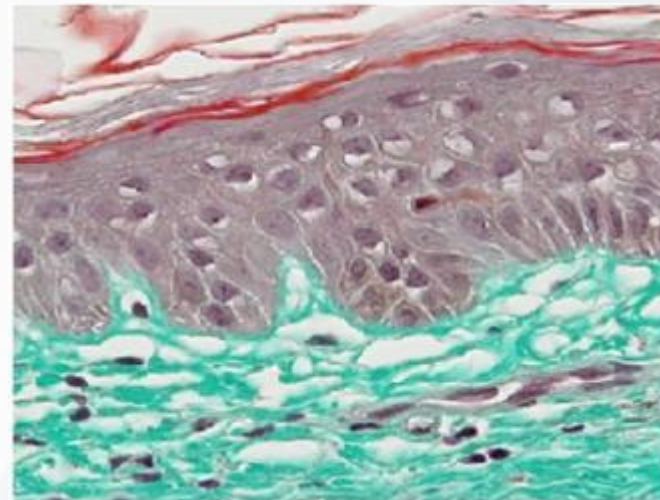

Cresterea
grosimii
epidermei

Cresterea
densitatii
colagenului
(culoarea
verde)

Cresterea grosimii epidermei si formarea de epiderma noua, imbunatatirea densitatii colagenului din derm. Test efectuat pe tesut uman.

Tratamentul Hydradermie Jeunesse regenereaza vizibil tenul.



1 ora. Tratament

Pregatirea pielii
8 minute

1. Ionizare Dinamica
10 minute

2. Electrode Thermic
5 minute

Serumul specific (option)
2 minute

3. Masaj
10 minute

Dupa tratament : Masca pt fata si ochi
10 minute

Dupa tratament : Serum si Crema
2 minute

Flash Make-up
3 minutes




Miscati eletrodul de 2 ori, fara sa
schimbati mainile cu electrozii

Tratamentul Hydradermie Lift regenereaza vizibil tenul

Tratamentul Hydradermie Lift regenereaza vizibil tenul

O data cu varsta, avem tendinta sa folosim mai putin muschii faciali, cauzand pierderea tonusului conturului facial. Pentru a mentine tonusul pielii corpului, se recomanda efectuarea de exercitii fizice.

Cu toate acestea, pentru a mentine tenul tanar, muschii trebuie sa fie stimulati pentru a revitaliza si creste activitatea lor.

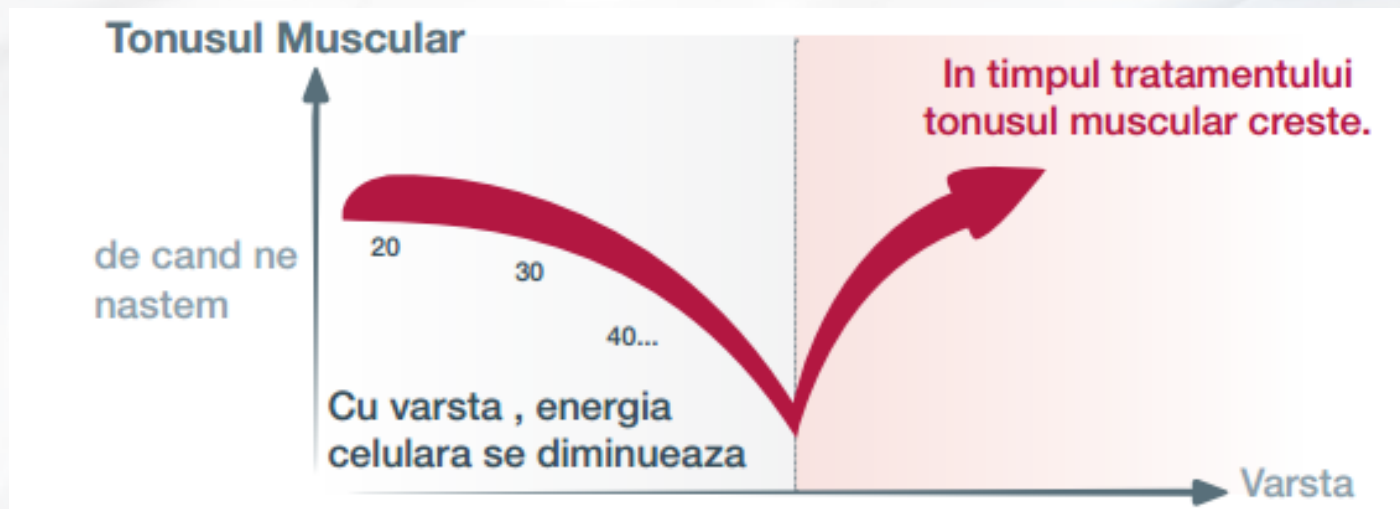

Tratamentul Hydradermie Lift regenereaza vizibil tenul

Cum putem stimula
tonusul muchilor faciali?

Drenarea Anti-ageing



Decongestioneaza sistemul
limfatic si uniformizeaza tenul.

Stimularea Musculara



Stimuleaza activitatea musculara pentru un
efect de lifting imediat asupra pielii



**CRESTE TONUSUL AVAND UN EFECT DE “BODY BUILDING” PENTRU TEN:
CONTURUL FACIAL ESTE RIDICAT SI REDEFINIT**


Tratamentul Hydradermie Lift regenereaza vizibil tenul

limitat pentru a asigura confortul clientului în timpul fazei de stimulare

Stimularea musculara folosind curent excitomotor.

- Acesta este un curent cu **frecventa joasa** care stimuleaza un numar mare de fibre musculare, in comparatie cu frecventa medie (care nu are un efect de tonifiere) si frecventa inalta (care nu are ca si target muschii)
- **Un singur tip de curent pt o eficienta mai buna si confort.**
- Acest curent de frecventa joasa adaptat his low frequency current has been :
 - **modulat** pt a preveni obisnuinta muschilor

Curent clasic

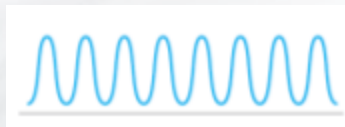

Curent limitat Guinot



Curent modulat a carui intensitate creste si scade treptat, iar viteza variaza intre 1 secunda si 1 data la fiecare 10 secunde, pentru eficienta maxima.

- **limitat** pt a asigura confortul clietilor in timpul stimulării musculare

Curent clasic



Curent modulat Guinot



Limitarea curentului diminueaza o parte a intensitatii stimulării pentru mai mult confort.

EXCLUSIV
GUINOT

- Deoarece stimularea musculara depinde de intensitatea curentului si conductivitatea pielii (care este legata de nivelul de hidratare), este important ca Serumul gel sa fie aplicat corespunzator si sa fie absorbit in piele.

Tratamentul Hydradermie Lift regenereaza vizibil tenul

Rezultate exceptionale vizibile la finalul tratamentului.



Metoda de tratament care ridica trasaturile faciale, tonifica muschii si rentinereste tenul

Tratamentul Hydradermie Lift regenereaza vizibil tenul



1 hr. Tratament

Pregatirea pielii
8 minute

1. Drenarea Anti-ageing
10 minute

2. Stimularea Musculaturii
15 minute

3. Masaj
10 minute


Dupa Tratament: Masca pt. fata si ochi
5 minute

Dupa Tratament: Serum si Crema
2 minute

Flash Make-up
3 minute



Repetati fiecare pas de 5 , in loc de 3

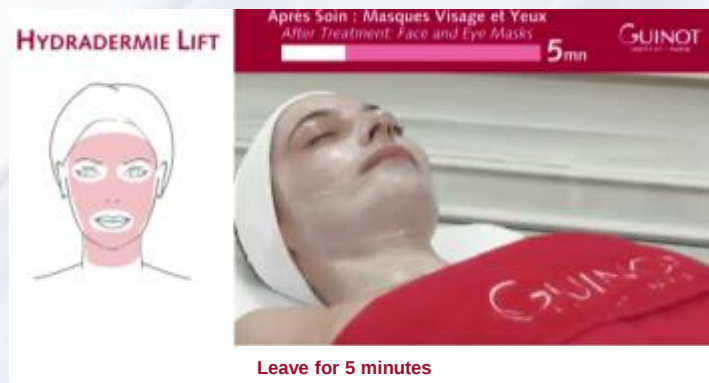

Lasati masca sa actioneze 5 min, in loc de 10



Aparatul (cod G453391)

Aparat inteligent

HYDRADERM
cellular  energy

Trainer in
SALON



Conectat la WIFI

Trainer in Salon

Ghideaza Esteticieana in timpul realizarii Tratatamentului

Garanteaza efectuarea tratamentelor corect, respectand timpul recomandat.



Real-time treatment videos

- Imbunatateste **expertiza** esteticiei, oferind asistenta in orice moment - precum un **trainer personal**.
- Oferă clientilor **servicii de calitate in mod constant**.
- Oferă rentabilitate optima prin respectarea timpului alocat tratamentului.



Trainer personal in salon

Video in timp real pentru toate Tratamentele GUINOT

Tratamente Faciale



- Hydraclean
- Hydradermie Jeunesse
- Hydradermie Lift
- Aromatic
- Beauté Neuve
- Liftosome
- Age Summum
- Eye Logic

Tratamente Corporale



- TechniSPA®
- Aromatic body contouring treatment
- Aromatic body softening treatment
- Techni-slimming (for export)
- Techni-firming (for export)

Metode de indepartare a parului




- ÉPIL CONFORT
- STICK'HAIR®

Aparat conecta la WIFI

Conectare WIFI BUILT-IN

- Update de la distanta
- Service de la distanta
- Ecran multi functional

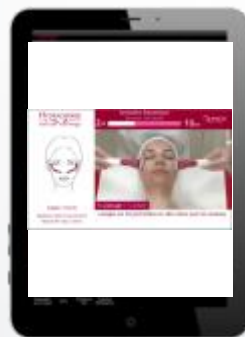


Android system



Funcții exclusive

Regenerarea vizibil trasaturile fetei multumita celor 3 functii:

Hydradermie Youth Treatment

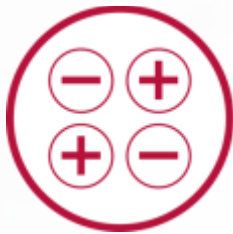

**IONIZARE
DINAMICA**



EFFECT TERMIC



Hydradermie Lift Treatment



Lifting Stim



- Setari implicite: Nivelul de intensitate al fiecărei funcții a fost pre-setat
- Electrocul se incalzeste automat la inceputul fazei.

Electrozii

Electrodezi rola



Electrozi- ergonomici care sunt utilizati pentru stimularea drenarii si pentru ionizare.

Electrod incalzibil



Electrod ergonomic cu indicator luminos de intensitate.



Argumente cheie

Argumente cheie

PENTRU A VINDE EFICIENT ACESTE METODE DE TRATAMENT



*O adevarata alternativa
la medicina estetica ,
care actioneaza rapid pe
semnele de imbatranire*

*Tratamentul Hydradermie
Youth este personalizat
Obtinem regenerarea vizibila
a tenului intind fiecare
obiectiv de frumusețe*

*Am un aparat patentat
ceea ce competitorii nu
au, cu care obtin
rezultate vizibile dupa
fiecare tratament*

*Hydradermie Lift
regenereaza
vizibil TRASATURILE
FACIALE folosind drenajul
antiageing si tonifierea
musculara*

*Cu Hydradermie Youth se
obține o regenerare vizibila
a pielii stimuland activitatea
celulara*

*Doctorii paralizeaza
muschii, in timp ce
esteticienele ii stimuleaza*

3 alternative la Medicina Estetica



- Elimina celulele moarte, permitand formarea celor noi .
- Permite **ingredientilor activi high-tech** sa patrunda in piele.

- Oferă energie celulelor noi
- Redă **activitatea celulara specifica tenului tanar**

- Dă tonus feței
- **Redefineste** trasaturile faciale

Oricare dintre aceste 3 tratamente pot fi prescrise ca si cura de 3 tratamente intensive sau ca si tratament global de regenerare .

(1 Age Summum + 1 Hydradermie Youth +1 Hydradermie Lift)

The background of the image is a light blue and white abstract design. It features several curved, overlapping planes that create a sense of depth and movement. Scattered throughout the background are numerous small, glowing white circles of varying sizes, some of which appear to be part of a larger, faint hexagonal grid pattern. The overall aesthetic is clean, modern, and futuristic.

GUINOT
INSTITUT • PARIS